


GEWUSST WIE: LEBENSBEDROHLICHE BLUTUNGEN STOPPEN MIT CELOXTM RAPID


Unkontrollierte Blutungen sind verantwortlich für über 35 % der präklinischen Todesfälle¹



1. Erkennen Sie gefährliche Blutungen

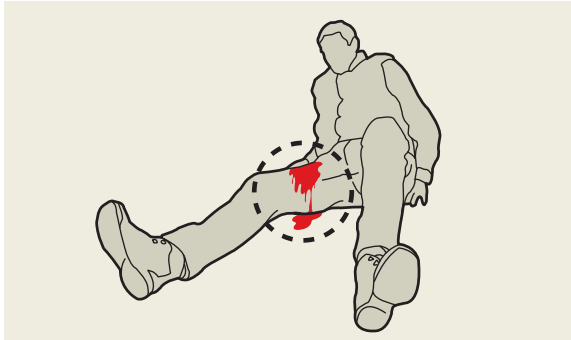


2. Legen Sie die Wunde frei - zerschneiden oder zerreißen Sie die Kleidung, die die Wunde bedeckt.

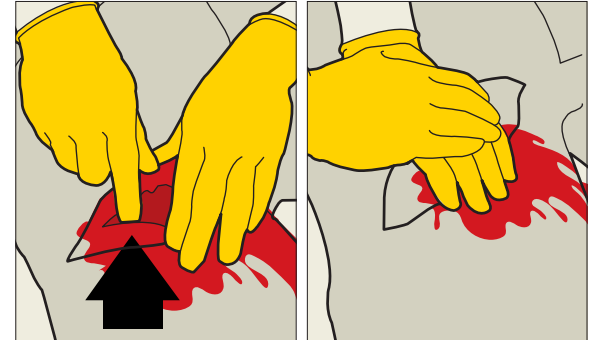

3. Identifizieren Sie die genaue Stelle der Blutung und üben Sie Druck auf sie aus.



4. Tupfen Sie das Blut um die Wunde herum ab

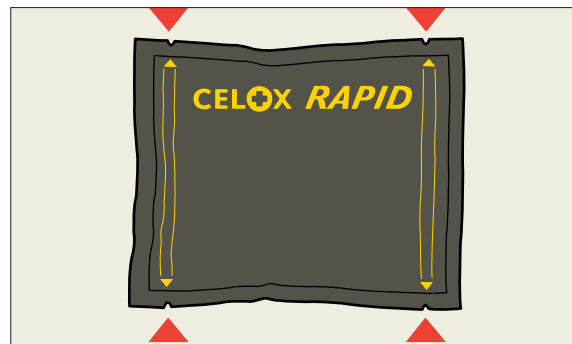

5a. Legen Sie das Produkt auf die Quelle der Blutung auf - an allen vier Ecken befindet sich eine Einreißkerbe




5b. Legen Sie das Produkt auf die Quelle der Blutung auf - üben Sie weiterhin Druck auf die Wunde aus, während Sie die Packung öffnen




5c. Legen Sie das Produkt auf die Quelle der Blutung auf - fahren Sie damit fort, die Wunde zu verschließen, indem Sie die Wunde mit Celox Rapid ausfüllen, bis die Wundhöhle geschlossen ist



6. Üben Sie 1 Minute lang, oder bis die Blutung gestillt ist starken Druck aus²

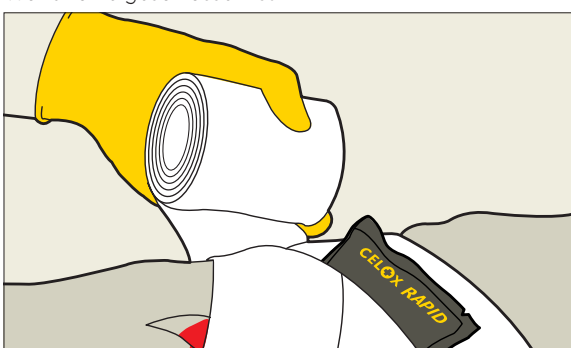

7. Sichern Sie die Wunde mit einem Verband

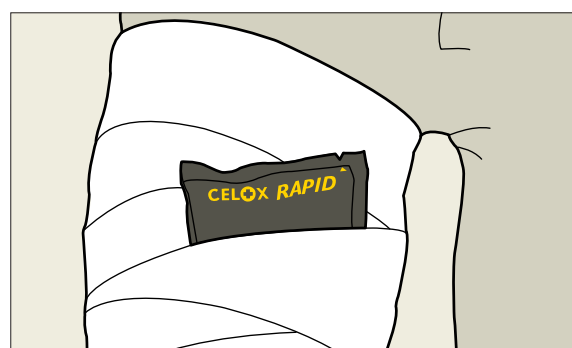

8. Entfernen Sie den Verletzten vom Unfallort

WAS BEI GEFÄHRLICHEN BLUTUNGEN ZU BEACHTEN IST

<C> = Gefährliche Blutung

A = Atemwege

B = Atmung

C = Kreislauf



SWISS SAFETY FIRST GMBH

T: +41 56 534 94 95

F: +41 56 534 94 93

E: info@swissafetyfirst.ch

www.swissafetyfirst.ch

1. Kauvar, D.S., Lefering, R., and Wade, C.E. (2006) Impact of hemorrhage on trauma outcome: an overview of epidemiology, clinical presentations, and therapeutic considerations. *J Trauma* 60, S3-11.

2. Celox Rapid ist vorgesehen für die Stillung lebensbedrohlicher Blutungen mit einer Kompressionszeit von 60 Sekunden, oder bis die Blutung gestillt ist. Hoggarth A, et al. Testing a new gauze hemostat with reduced treatment time. Posterpräsentation auf der ATACCC, Ft Lauderdale, August 2011.

Copyright © 2019 Medtrade Products Ltd. CELOXTM ist ein Markenzeichen von Medtrade Products Ltd. Alle Rechte vorbehalten.